

インターナショナルキットに含まれています



SST チューブ 3 本 LAV チューブ 3 本 白いトップチューブ 2 個 尿カップ 1 個 Aptima 尿 1 個 ピпет 2 個

患者チェックリスト


- 採血前にジェルパックを冷蔵してください。(冷凍して発送する場合は必ず平らに寝かせてください。)
- すべてのバイアルと容器の有効期限を確認してください。(有効期限が切れている場合は使用しないでください)
- キットボックス内のラボ注文をチェックして、氏名、生年月日、人口統計が正しいことを確認してください。
- 書類やジェルパックを含むキット全体を必ずご予約の際にお持ちください。
- 採取の1時間前には排尿しないでください。

書類

- 国際キットの説明書
- プロフォーマインボイスと通関レター
- Fedex UN3373 配送バッグ & FedEx パールポーチ
- フェデックス返品ラベル

収集手順

1. キット内の検査オーダーを確認し、すべての患者情報が記入され、正しいことを確認してください。
2. すべてのチューブと容器に、患者の姓名、生年月日、採取日を記載したラベルを貼ります。
3. キット内に付属のすべてのチューブを使用して血液サンプルの採取を開始します。
4. 採取後、SST チューブ 3 本と LAV チューブ 3 本を取り出し、8～10 回転倒混和します。
5. 遠心分離の前に、すべてのチューブを少なくとも 30 分間、1 時間以内に凝固させてください。
6. 回収後 1 時間以内に、1000～1300 G または 2200～2500 RPM で 15 分間遠心分離します。
7. (1) SST チューブを取り出し、最大 3ML の血清を抽出し、「SERUM」と表示された白いトップチューブに移します。
8. (1) LAV チューブを取り出し、最大 3ML の血漿を抽出し、「PLASMA」とラベル付けされた白いトップチューブに移します。
9. 尿を採取する場合は、患者に最低 20～30 ML の尿を滅菌尿カップに採取してもらいます。
10. CT/NG 検査が必要な場合は、2ML の尿をカップから黄色の Aptima チューブに移します。(移し替え後は尿カップは捨ててください)

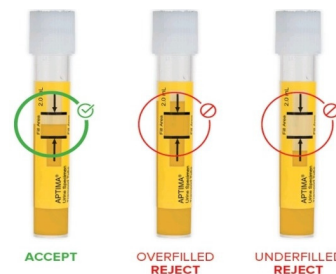

Aptima Tube: 黒い線の間のみを充填します。過剰充填または不足充填は拒否されます。

出荷指示

1. すべての容器に患者の氏名、生年月日、採取日を記載したラベルが貼られていることを確認してください。
2. すべてのチューブと尿サンプルを確認したら、それらをバイオハザード検体バッグの中に入れます。
3. ゲルパックを患者のサンプルの入った銀製バブルメーカーに追加し、閉じます。
4. 検査指示書が適切に記入され、すべての検査が明確にマークされていることを確認してください。
5. 患者ラボの注文書、患者のサンプルが入った銀色のバブルメーカーをキットボックスに追加し、閉じます。
6. プロフォーマ請求書は、患者またはクリニックによって完全に記入され、署名されなければなりません。
7. 返品ラベルとプロフォーマ請求書を FedEx の紫色のポーチに入れ、FedEx パックの外側に貼り付けます。
8. FedEx のピックアップまたはドロップオフを手配します。注: ピックアップコールの場合は 1-800-463-3339 (1800-GO-FEDEX)